




Monte-escaliers Homeadapt

Pour votre indépendance

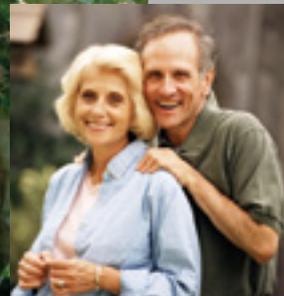



Monte-escaliers Homeadapt

Le monte-escalier idéal si vous recherchez à la fois la qualité et la durabilité.



L'installation d'un monte-escalier chez vous vous permettra de continuer à utiliser l'escalier de votre domicile. Vous retrouverez toute la liberté que vous aviez avant que les escaliers ne deviennent pour vous un véritable défi.



Nous vous proposons deux monte-escaliers pour escalier droit et un pour escalier tournant. Les monte-escaliers peuvent être placés du côté gauche ou droit de l'escalier. Le rail-guide est fixé sur les marches de l'escalier, et non sur le mur. Tous les modèles permettent une utilisation confortable, en souplesse et silencieuse.

Dès que vous aurez choisi votre monte-escalier Homeadapt, votre représentant viendra mesurer votre escalier, vous proposera un devis et commandera votre monte-escalier. L'installation est rapide, entre une heure et une demi-journée, suivant la configuration de votre escalier. Les conseillers et techniciens Homeadapt possèdent toutes les compétences nécessaires pour installer et entretenir votre monte-escalier et vous pouvez vous adresser à eux en toute confiance si vous avez des questions ou des demandes particulières.

La gamme Homeadapt : les modèles Elan et Elite Straight pour les escaliers droits et le modèle Elite Curve pour les escaliers à un ou plusieurs tournants.



A middle-aged man with grey hair and a friendly smile is seated on a motorized stairlift. He is wearing a dark blue long-sleeved shirt, light-colored trousers, and brown leather shoes. He is holding a book in his lap. The stairlift is a white plastic chair-like device with a motor base, mounted on a staircase with a dark, patterned carpet. A wooden handrail is visible on the left side of the stairs. The background is a plain, light-colored wall.

« Mes journées sont tellement plus faciles et plus agréables depuis que j'ai un monte-escalier. J'ai le sentiment d'avoir retrouvé ma liberté et c'est formidable. »

Monte-escaliers
Homeadapt

Les capteurs de sécurité de la plaque repose-pieds et du chariot arrêtent le monte-escalier en cas d'obstacle.



Les télécommandes vous permettent d'appeler ou de renvoyer le monte-escalier en pressant sur un bouton.

Sécurité Si le monte-escalier rencontre un obstacle quelconque en cours de déplacement, les capteurs de sécurité de la plaque repose-pieds et du chariot immobilisent immédiatement le monte-escalier. Grâce à leur double système de freinage, nos monte-escaliers comptent parmi les plus sûrs au monde. Le système de freinage électromagnétique est complété par un réducteur autobloquant et un frein de survitesse qui assurent parfaitement votre sécurité. Les monte-escaliers Homeadapt sont équipés d'une fonction pivotante, permettant au siège de pivoter entièrement et ne laissant aucun jeu entre le siège et le haut ou le bas de l'escalier. Ceci permet à l'utilisateur de se relever en toute sécurité avec les deux pieds reposant fermement sur le sol.

Utilisation Tous nos monte-escaliers sont équipés d'un interrupteur directionnel placé sur l'accoudoir de votre choix. Il suffit de presser sur cet interrupteur à bascule dans la direction du déplacement souhaité pour démarrer le monte-escalier. Un interrupteur à levier est également disponible en option.




Alimenté par batterie Les monte-escaliers Homeadapt sont alimentés par deux batteries de 12 volts rechargeables par l'intermédiaire d'un chargeur branché dans une prise électrique ordinaire. Les batteries du monte-escalier se rechargent quand le monte-escalier est en position de stationnement. Vous pouvez ainsi monter ou descendre l'escalier de votre habitation, même en cas de panne de courant.

Compact Le rail ultramince est placé à la verticale tout contre le mur. Après utilisation, le siège, les accoudoirs et le repose-pieds se replient facilement sur une position non encombrante, permettant le passage des autres membres de la famille et des amis qui désirent emprunter l'escalier.

Sans fil Deux télécommandes sans fil peuvent être utilisées pour renvoyer ou appeler le monte-escalier en pressant sur un bouton.

Option de rail articulé Si un seuil de porte en bas de l'escalier risque d'être obturé par le rail, vous pouvez opter pour une section de rail inférieure articulée, pouvant être relevée manuellement ou automatiquement afin de libérer le passage. Si un rail courbe entrave le passage d'un seuil en bas de l'escalier, plutôt que d'utiliser un rail articulé, il suffit de stationner le monte-escalier dans le coin, à distance de l'escalier.

Le monte-escalier Elan offre une qualité exceptionnelle à un prix intéressant, avec de nombreux détails utiles tels que la possibilité de stationner et recharger le monte-escalier n'importe où le long du rail, ainsi qu'une largeur très compacte en position repliée.

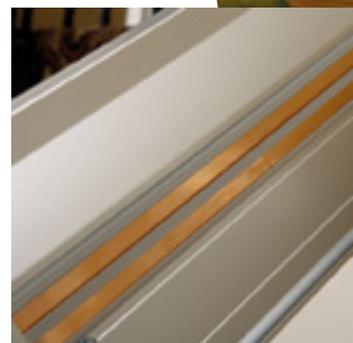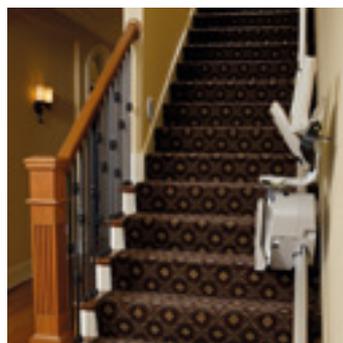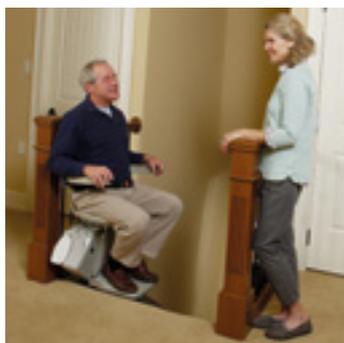

Monte-escalier Elan

Le dernier venu dans notre gamme de produits est un monte-escalier de hautes performances, proposé à un prix abordable.

Compact Le design du monte-escalier Elan a un encombrement réduit, ce qui laisse beaucoup de place pour emprunter l'escalier. Le rail ultramince peut être installé à 127 mm seulement du mur et avec les accoudoirs, le siège et le repose-pieds replié, le monte-escalier Elan ne prend que 305 mm.

Siège spacieux et hauteur réglable Avec une largeur de 509 mm, le siège du monte-escalier Elan compte actuellement parmi les plus larges du marché. La hauteur d'assise est réglable pour s'adapter à chaque personne. La capacité de poids est de 136 kg.

Profil du rail Le profil droit du rail Homeadapt est celui du marché qui prend le moins de place. Notre philosophie veut que le rail ait un impact réduit sur votre habitation. Le résultat est un design à la fois unique et attrayant.

Options de motorisation Votre monte-escalier actuel Elan peut à tout moment être équipé de trois options de motorisation : pivotement motorisé, repose-pieds rabattable motorisé et rail articulé motorisé. Que vous en ayez besoin immédiatement ou dans le futur, l'option de motorisation ne vous oblige pas à remplacer le chariot, contrairement à de nombreux autres types de monte-escaliers.

Stationnement et recharge La bande de charge électrique continue placée tout le long du rail permet de recharger les batteries du monte-escalier Elan indépendamment du lieu de stationnement du chariot. La télécommande permet d'immobiliser le monte-escalier n'importe où sur le rail, ce qui permet de libérer le hall d'entrée et de dissimuler le monte-escalier.

Installation Grâce à sa simplicité de conception, le monte-escalier Elan est à la fois simple et rapide à installer.







Le siège du monte-escalier Elite pivote en haut et en bas de l'escalier.

Monte-escalier droit Elite


Un monte-escalier de classe supérieure avec un siège luxueux, un rail peint ultra-mince et une capacité exclusive de 190 kg.

Confort supérieur Le siège du monte-escalier luxueux Elite n'est pas seulement le plus confortable que vous ne puissiez jamais trouver sur un monte-escalier. Il intègre également une fonction pivotante manuelle en haut et en bas de l'escalier. La hauteur d'assise, l'espace entre les accoudoirs et la hauteur du repose-pieds sont réglables pour s'adapter à chaque individu. Pour votre confort, le monte-escalier intègre également une fonction de démarrage et d'arrêt progressif.

Capacité supérieure L'une des caractéristiques qui font du monte-escalier Elite un modèle unique parmi ses concurrents est sa capacité exceptionnelle de 190 kg. Ce monte-escalier est conçu pour offrir la meilleure longévité et la meilleure fiabilité possibles.

Une multitude d'options Le monte-escalier Elite propose un choix de nombreuses options afin de pouvoir s'adapter à tous les besoins particuliers. Suivant les besoins, le pivotement du siège peut être manuel ou motorisé, ainsi que le rail articulé. Le repose-pieds peut se rabattre manuellement ou se relever en repliant l'assise du siège. Il est possible d'installer soit un interrupteur à bascule, soit un interrupteur à levier et même de choisir un siège extra large.

Profil du rail Le profil droit du rail Homeadapt est celui du marché qui prend le moins de place. Notre philosophie veut que le rail ait un impact réduit sur votre habitation. Le résultat est un design à la fois unique et attrayant.

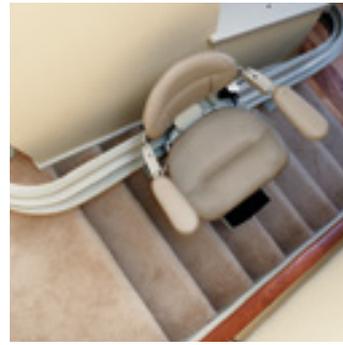

Le rail réalisé sur mesure du monte-escalier Elite Curve épouse étroitement le contour du mur.

Avec la rallonge de rail en option pour le haut de l'escalier, le monte-escalier Elite Curve peut être mis de côté afin de libérer de la place dans l'escalier.



« J'ai décidé de faire installer un monte-escalier quand je n'ai plus été capable de monter seul l'escalier. Il s'est avéré que cela a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. »



Monte-escalier Elite Curve

Confort supérieur, qualité de déplacement inégalée et capacité de 190 kg unique sur le marché, modèle adapté aux escaliers à une ou plusieurs courbes.

Conception sur mesure Le monte-escalier Elite Curve est réalisé sur mesure pour s'adapter à votre escalier. Sa conception permet de le placer du côté gauche ou droit de l'escalier. Le rayon de courbure est faible, ce qui permet au rail d'épouser étroitement le contour du mur, même dans les courbes. Le siège est le même modèle au confort exceptionnel que l'on retrouve sur le monte-escalier à rail droit Elite.

Qualité de déplacement Les rails pour escaliers tournants s'installent par sections avec des raccords aussi ajustés que possible afin d'améliorer la qualité du déplacement. Au lieu d'utiliser des sections de rails préfabriquées qui donnent généralement des raccords imprécis et des à-coups lors du déplacement, nous avons choisi pour le monte-escalier Elite Curve un rail forgé par des ouvriers expérimentés, afin d'obtenir un mouvement de déplacement continu et en douceur, avec une stabilité remarquable quelle que soit la configuration de l'escalier.

Options Un point de charge supplémentaire pour la batterie, un siège pivotant motorisé et une plaque repose-pieds motorisée peuvent compléter le monte-escalier afin de l'adapter à vos exigences particulières, ainsi qu'un siège plus large pour un confort accru.



Caractéristiques des monte-escaliers


Caractéristiques	Elan	Elite	Elite Curve
Hauteur d'assise réglable	✓	✓	✓
Hauteur de repose-pieds réglable	-	✓	✓
Siège à pivotement manuel en haut de l'escalier	✓	✓	✓
Siège à pivotement manuel en bas de l'escalier	-	✓	-
Deux télécommandes d'appel ou de renvoi	✓	✓	✓
Ceinture de sécurité avec boucle	✓	✓	✓
Interrupteur à bascule facile à utiliser	✓	✓	✓
Diagnostics visuels embarqués	-	✓	✓
Diagnostics audio embarqués	✓	✓	✓
Repose-pieds, accoudoirs et siège rabattables	✓	✓	✓
Capteurs de sécurité sur plaque repose-pieds et chariot	✓	✓	✓
Alimentation par deux batteries de 12 volts	✓	✓	✓
Capacité nominale pour le poids de l'utilisateur	136 kg	190 kg	190 kg
Engrenages à vis sans fin autobloquante, avec pignon et crémaillère	✓	✓	✓
Repose-pieds rabattable motorisé en option	✓	✓	✓
Fonction optionnelle de pivotement motorisé du siège*	✓	✓	✓
Rail articulé motorisé en option	✓	✓	-
Siège extra large en option	-	✓	✓
Interrupteur à levier en option	✓	✓	✓
Charge continue le long du rail	✓	-	-
Voyants de charge sur les plaques de rail supérieure et inférieure	-	✓	✓
Poste de charge optionnel avec stationnement au milieu de l'escalier	-	✓	✓
Les accoudoirs réglables s'élargissent de 110 mm, passant de 450 à 560 mm	-	✓	✓
Démarrage progressif	✓	✓	✓
Arrêt progressif	✓	✓	✓
Rail articulé manuel	✓	✓	-
Profil de rail vertical ultramine	✓	✓	✓

* Cette option ne peut pas être combinée avec l'option de stationnement au milieu de l'escalier ou de siège extra large.


Homeadapt Elan

Dimensions


Vue de face haut et bas de l'escalier

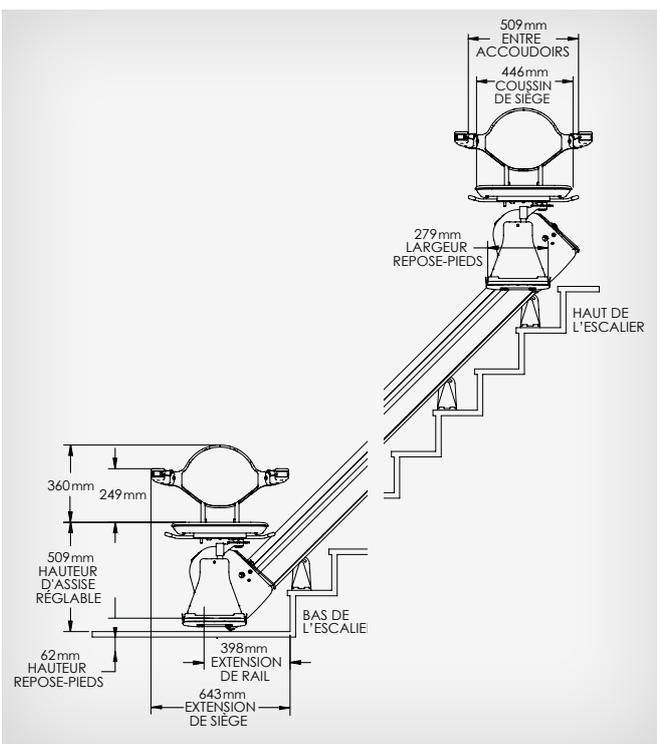


Vue de haut

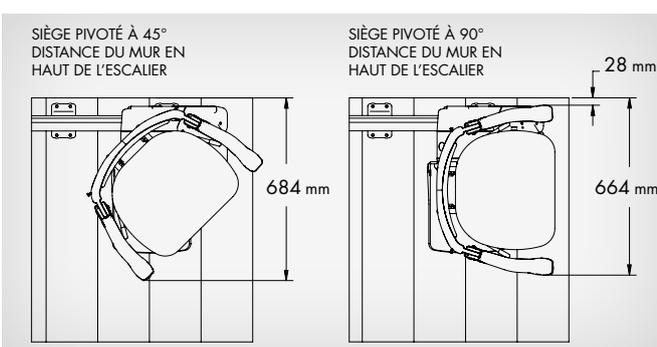

Vue de côté

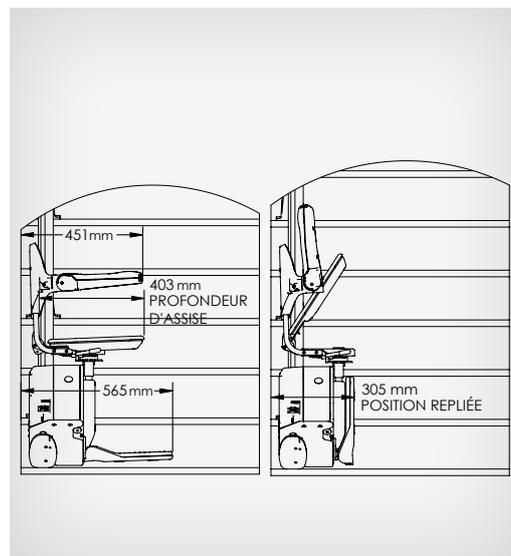

Vue de haut

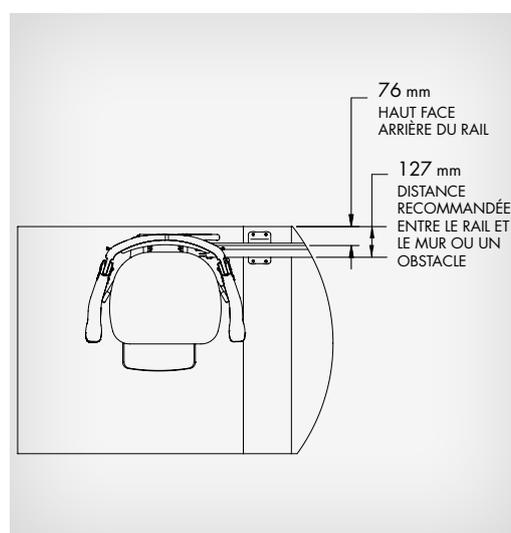

Bas de l'escalier (extension)


Les dimensions de l'extension en bas de l'escalier se basent sur une pente du rail de 45 degrés pour une hauteur de marche de 20 cm. Les dimensions varient en fonction de la pente et de la hauteur de marche.

Les dimensions sont approximatives et dépendent de la pente de l'escalier, de la hauteur d'élévation et des réglages du siège effectués pour l'utilisateur. Prière de noter que l'ajout d'un siège pivotant électrique augmente la hauteur du siège de 30 mm.


Homeadapt Elite Straight

Dimensions


Vue de face haut et bas de l'escalier

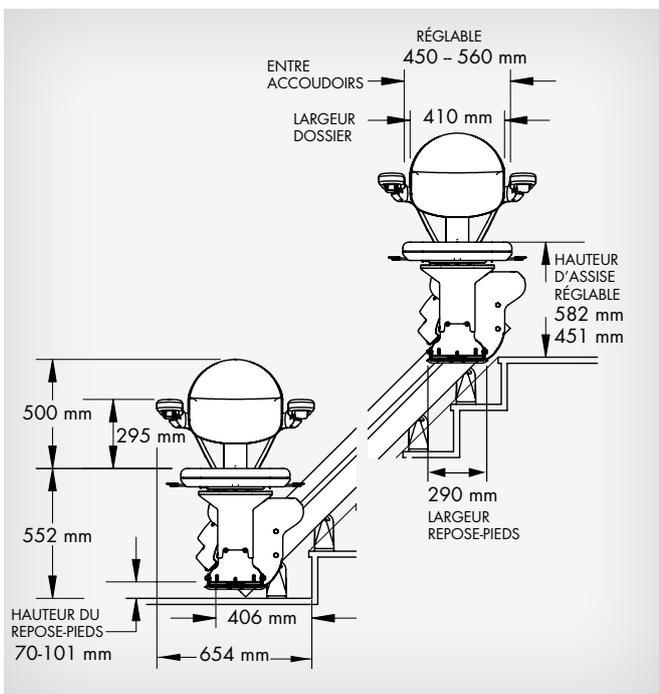


Vue de haut

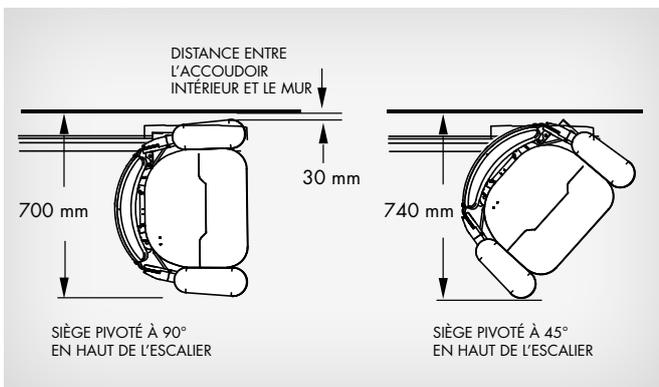

Vue de côté

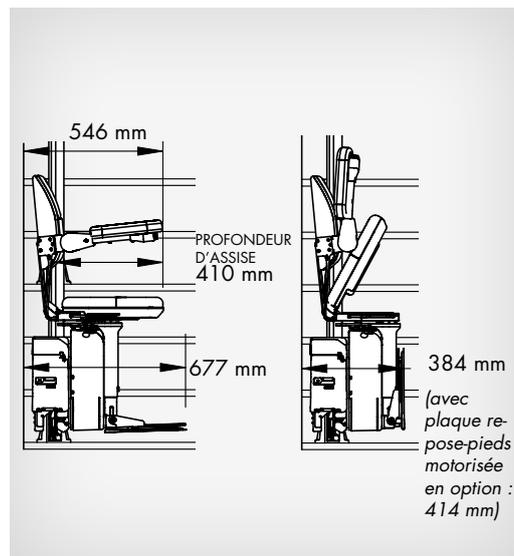

Vue de haut

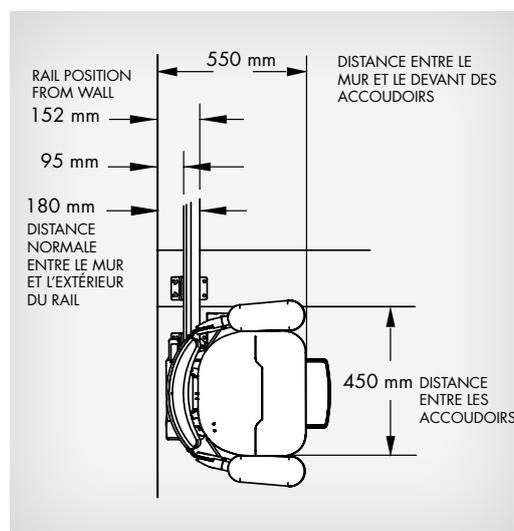

Hauteurs d'assise alternatives (mesurées au niveau inférieur – du siège au sol)


- 552 mm
- 577 mm
- 603 mm
- 629 mm

Les dimensions sont approximatives et dépendent de la pente de l'escalier, de la hauteur des marches et des réglages du siège effectués pour l'utilisateur. Prière de noter que l'ajout d'un siège pivotant électrique augmente la hauteur d'assise de 50 mm.


Homeadapt Elite Curve

Dimensions


Vue de face haut et bas de l'escalier

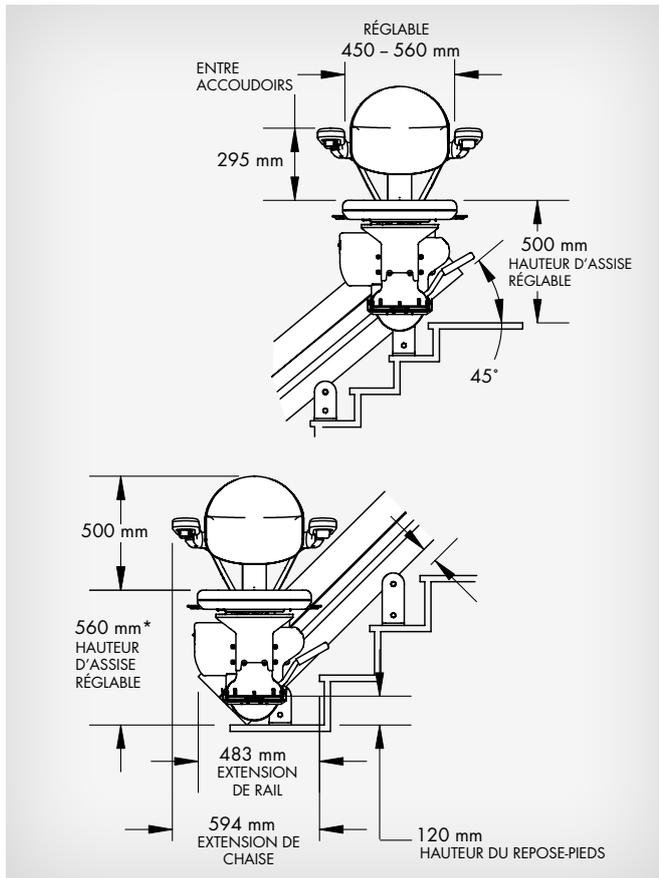


Vue de côté

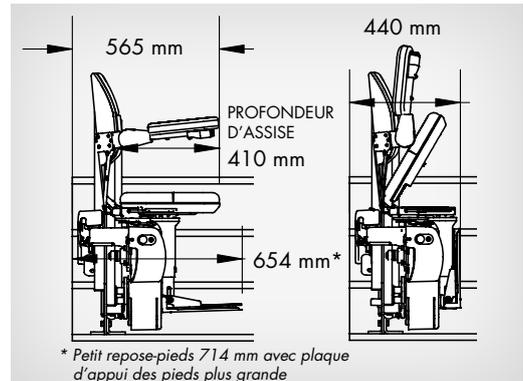

Vue de haut

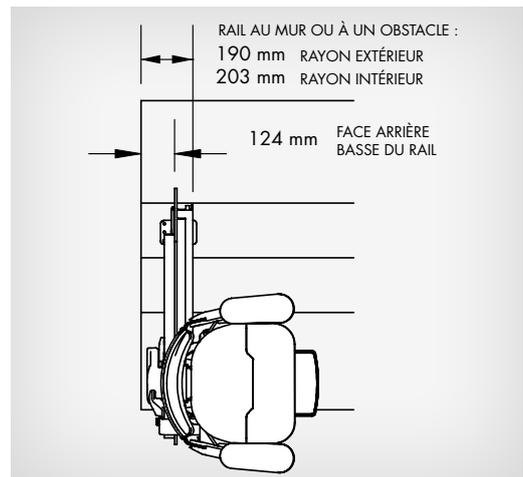

Vue de haut

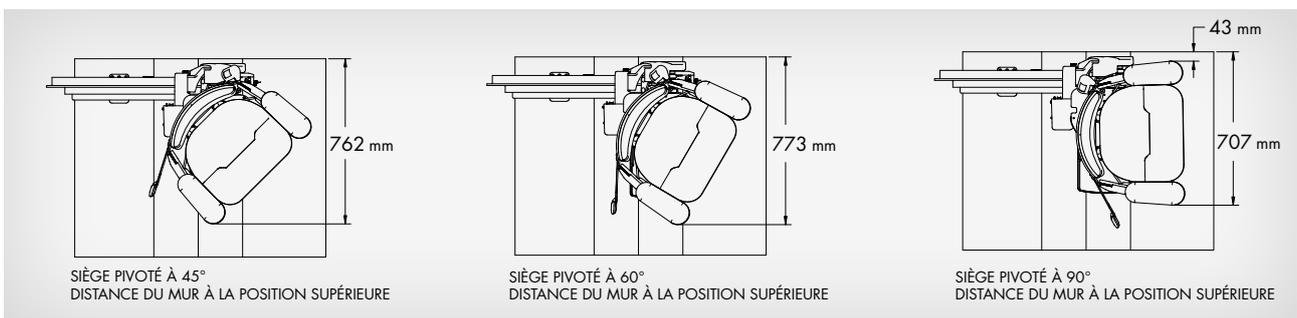

Les dimensions sont approximatives et dépendent de la pente de l'escalier, de la hauteur d'élévation et des réglages du siège effectués pour l'utilisateur. Prière de noter que l'ajout d'un siège pivotant électrique augmente la hauteur du siège de 50 mm.



Homeadapt UK Ltd est une filiale à part entière de la société Bruno Independent Living Aids établie aux États-Unis. Les monte-escaliers Homeadapt sont fabriqués exclusivement par Bruno. Nos monte-escaliers sont testés suivant les normes américaines, canadiennes et européennes, garantissant la sécurité d'utilisation. Créée en 1984, la société Bruno est le plus important fabricant de monte-escaliers d'Amérique du Nord. Homeadapt et Bruno sont certifiés ISO9001, ce qui garantit que le monte-escalier que vous avez choisi pour votre domicile est conforme aux normes les plus strictes en matière de qualité et de

longévité. Grâce à nos dizaines d'années d'expérience, nous connaissons parfaitement vos besoins et nous y répondons par les meilleures conceptions innovantes qui soient. Quand vous aurez décidé d'acquérir un monte-escalier, venez nous rendre visite pour obtenir des conseils et des informations.

Les monte-escaliers Homeadapt vous assisteront fidèlement pendant de nombreuses années. Notre monte-escalier vous aidera à surmonter cet obstacle que représente l'escalier de votre domicile. Grâce à lui, vous pourrez de nouveau profiter de l'ensemble de votre domicile, avec votre famille et vos amis. Un monte-escalier Bruno vous permet de continuer à habiter chez vous et de profiter pleinement de votre domicile !

Les monte-escaliers Homeadapt sont vendus et installés exclusivement par l'intermédiaire de notre réseau de représentants agréés. Vous pouvez avoir la certitude que vos besoins particuliers seront pris en charge de manière à la fois agréable et professionnelle.

HOMEADAPT UK LTD
Unit 1, Windsor Industrial Estate
Rupert Street
Aston, Birmingham B7 4PR, UK
Phone: +44 (0)121 333 5186
Fax: +44 (0)121 359 6194
E-mail: info@homeadapt.com
www.homeadapt.com



*Les illustrations, descriptions et caractéristiques de la brochure reposent sur des informations d'actualité sur le produit. Homeadapt UK Ltd. se réserve le droit de procéder à des changements sans préavis.
© 2012 Homeadapt UK Ltd.*

Représentant Homeadapt